

Ultra BAC®



LINGETTE DÉSINFECTANTE

Désinfection sans rinçage des objets, surfaces et mains

Antiseptie rapide des mains
Large spectre antimicrobien
Produit actif sur Coronavirus



> Utilisation

Utilisation en milieu médical, paramédical et services d'urgences, SAMU, pompiers...

> Mode d'emploi

Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 2x45s sur les mains. Temps de contact pour les surfaces : 5min. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

> Composition

Solution d'imprégnation des lingettes : Substances actives :
substance active biocide (TP1, TP2 et TP4) : Ethanol CAS n°64-17-5 (660,1 g/kg).
Non-tissé : Résistant en PP blanc, 22g/m²

> Caractéristiques

Dimensions lingette : 130 x 210 mm environ.

> Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	TEMPS	NORMES
Bactéricide	30 sec	EN 1276 ⁽¹⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae) EN 13727+A2 ⁽¹⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae)
	2 x 30 sec	EN 1500
	2 x 45 sec	EN 1500
	2 min	EN 13697+A1 ⁽¹⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae + Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis et thyphimurium, Yersinia enterocolitica et Campylobacter jejuni)
	5 min	EN 16615 ⁽¹⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Staphylococcus aureus) Norme réalisée sur la lingette imprégnée
Mycobactéricide	1 min	EN 14348 ⁽¹⁾
Levuricide	30 sec	EN 1650 ⁽¹⁾ (C. albicans) EN 13624 ⁽¹⁾ (C. albicans)
	1 min	EN 13624 ⁽¹⁾ (Aspergillus brasiliensis)
	2 min	EN 13697+A1 ⁽¹⁾ (Saccharomyces cerevisiae)
	5 min	EN 1650 ⁽¹⁾ (Aspergillus brasiliensis) EN 13697+A1 ⁽¹⁾ (C. albicans, C. auris, A. brasiliensis) EN 16615 ⁽¹⁾ (C. albicans)
Virucide ⁽²⁾	30 s	EN 14476+A2 ⁽¹⁾ (Coronavirus humain 229E, Coronavirus BCoV, H1N1, Rotavirus)
	1 min	EN 14476+A2 ⁽¹⁾ (Norovirus, Adénovirus, virus de la Vaccine, couvrant les virus enveloppés dont : Orthopoxvirus (dont fait partie le virus responsable de la variole du singe), Hépatite B, Hépatite C, VIH...)

⁽¹⁾ Conditions de propreté

⁽²⁾ Spectre limité

> Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement. Utilisation réservée aux professionnels. Consulter la fiche de données de sécurité.

> Logistique

	100 lingettes
Conditionnement	boîte
Colis	12 boîtes
Colis dimensions extérieures (cm)	32,7 x 24,5 x 17,3 H
Poids brut	4,81 kg
Code produit	520001

401316

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

HYGIÈNE CORPORELLE